

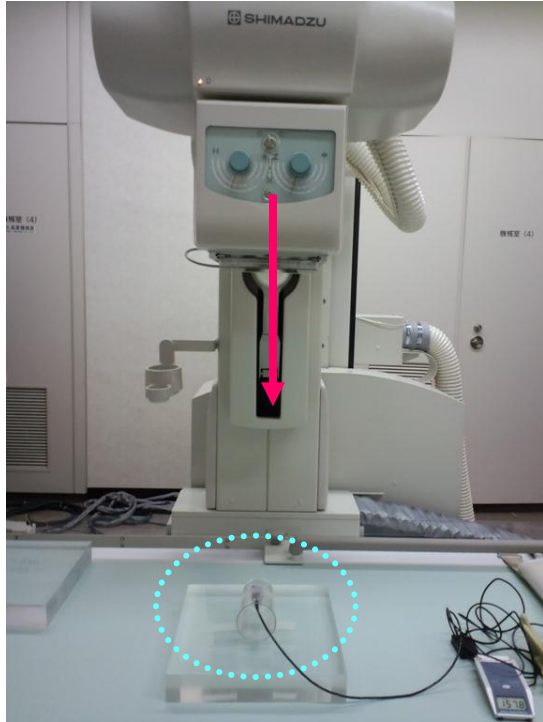


直接X線実験

グローブなしで線量計配置

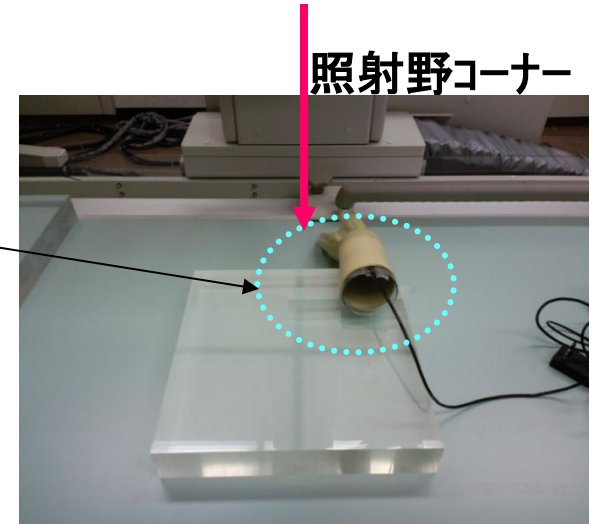

グローブの内側に線量計配置

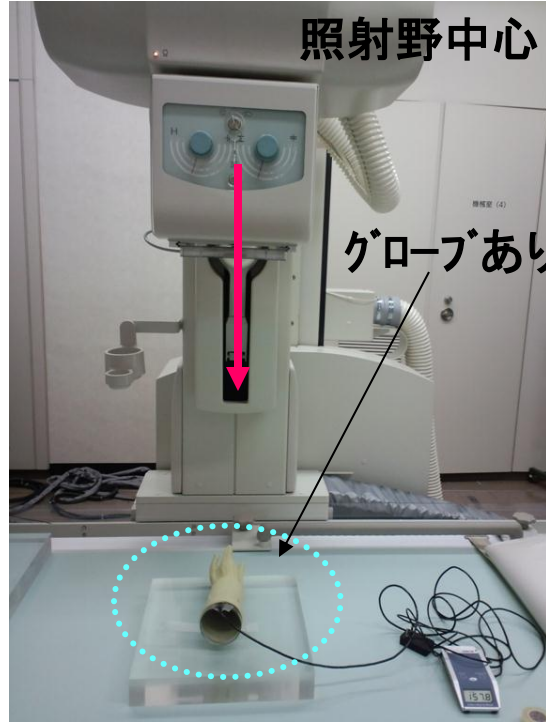

	グローブなし	グローブあり	比
照射野の中心	159.22 μGy (グローブなし)	89.552 μGy (グローブあり)	0.562
照射野の端	159.22 μGy (グローブなし)	73.222 μGy (グローブあり)	0.460

※ 照射野の中心では、グローブを装着することで、約44%カットできる。

※ 照射野の端では、グローブを装着することで、約54%カットできる。

※ 撮影条件 60KV 250mA 50msec

参考画像

