

白黒サーマルプリンター用紙

Flair 110-HG(幅110mmx長さ18m)

Flair 105-HG(幅105mmx長さ18m)




Flair 110-HG
Flair 105-HG

高諧調度及び高濃度の発色による正確な画像投影が可能です。
光沢のあるサーマルプリンター用紙ですので、高精細画像を
隅々まで艶やかに質感高く描出することが可能です。

3つのメリット


1. 保存状態が悪くても
より良い画像を保ちます。

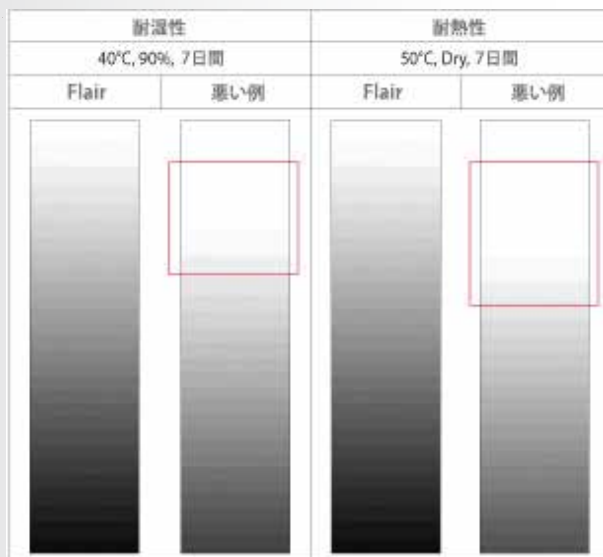

2. 優れた加工技術で水分、指紋、
超音波ゲルから大事な画像を守ります。



3. 簡単に切る事ができます。
(切り口も綺麗)

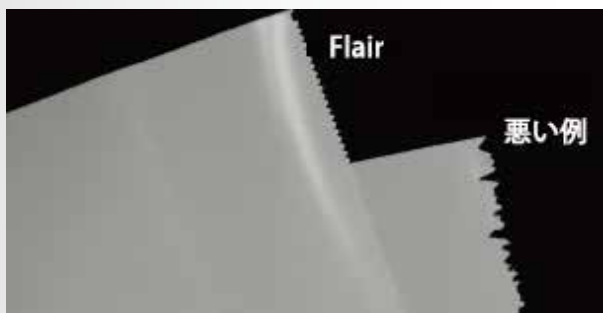

注意事項

1. 用紙のセットする際には、

- * 用紙の表面に指紋や汗、異物などが付かないようにご注意ください。
- * 用紙のガードエッジ部分からラベルを取り外し、用紙を 15~20cm 程プリンターの外側に出してセットしてください。

2. 未使用の用紙の保管の際には、

- * 保管環境は、30° 以下の日陰で保管してください。
- * 高温多湿及びほこりの多い場所、日光は避けて保管してください。
- * アルコール及び塩ビ、揮発性物質などは避けてください。

3. 使用済みの用紙の保管の際には、

- * ポリプロピレン材質の袋に入れ、30° 以下の日陰で保管してください。
- * 印刷済みの用紙を付着させる際には、水性接着剤や両面テープなどをご利用ください。
- * 印刷済みの用紙には、他の用紙と区別して用紙の印刷された面が付かないように保管してください。

フレア株式会社
〒192-0042
東京都八王子市中野山王 1-17-19
TEL:042-634-9491 FAX:042-634-9492
Email:info@flair-med.com